



Maak je Heine 30 (PRO) en Delta One digitaal met een universal smartphone adapter!



Tips & tricks

- Zorg dat het dermatoscopie beeld eerst scherp gesteld is zonder telefoon
- Bepaal de hoofdcamera van je smartphone door je camera te openen, op 1x te zetten en je vinger kort voor één lens tegelijk te houden. Kijk welke blokkeert > hoofdcamera.
- Sommige toestellen wisselen automatisch van lens, dan krijg je onscherpe beelden. Oplossingen:
 - Tik expliciet op 1x vergroting;
 - Zoom niet digitaal in maar ná het maken van de foto;
 - Vermijd een macro-switch vanuit de instellingen van je telefoon: zet macro bedieningen aan en/of automatische schakelen naar de andere lenzen uit;
 - Gebruik de app Halide (22 euro p/j) om één lens vast te zetten (macro-camera). Hiermee wordt auto-switch voorkomen.
- Maak altijd een 1 macrofoto, een gepolariseerde en niet-gepolariseerde foto.
- Gebruik steeds dezelfde setup. **Tip: gebruik een mobiele praktijktelefoon.**

Kom je er niet uit?
Bekijk de
uitlegvideo!

